

# FJ Clip

フリージョースタイル&安定したグリップ力



開発主幹

藤井 秀則 先生

Sunrise Japan Hospital Phnom penh

## 腹腔鏡内で臓器を釣り上げるクリップ

- フリージョースタイル
- 専用鉗子が要らない
- 5mm用のトロッカーに入る
- 丈が短く釣り上げやすい
- 安定した把持力がある
- 組織の挫滅が少ない
- リユース仕様で経済性を考慮



特許取得済

model	product	Length (mm)	Price
FJ Clip 5 24-0001	ステンレス	全長/30 把持長/13	105,600円(税込)

model	product	Length (mm)	Price
FJ Clip 12 24-0002	ステンレス	全長/35 把持長/13	105,600円(税込)



Scale 1/1



Scale 1/1

医療機器届出番号18B2X10004000121

医療機器届出番号18B2X10004000121


CHARMANT

# FJ Clip

## 使用方法



● トロッカーに挿入  
写真はFJ Clip5

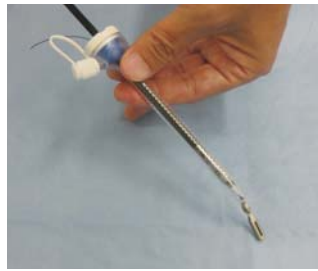

● トロッカーを通過



● 2つの鉗子で簡単に操作  
専用鉗子は要りません





(12mm)



(5mm)

● しっかりした開き幅

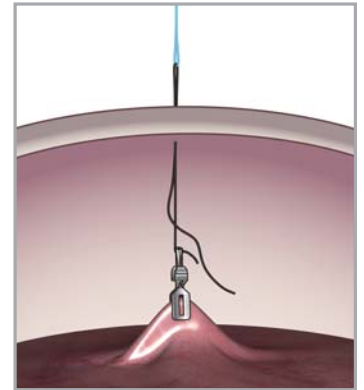
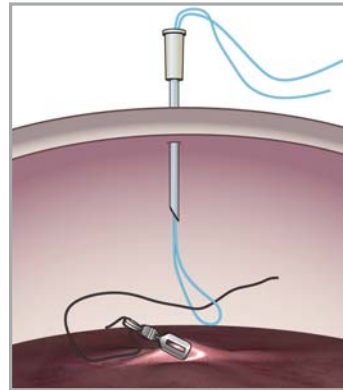


体内の糸を体外に取り出すには


先端がループになるように4-0ナイロンを通した22G針(φ0.7mm)  
(F-needleとして発表済)を用いる

## 症例：腹腔鏡下


● ペンローズドレーンを用いた肝左葉の挙上(12mm)

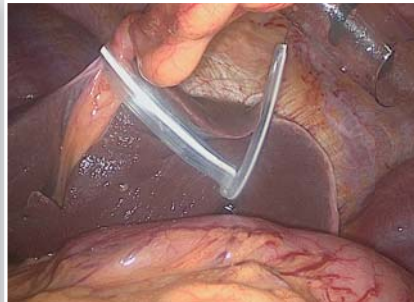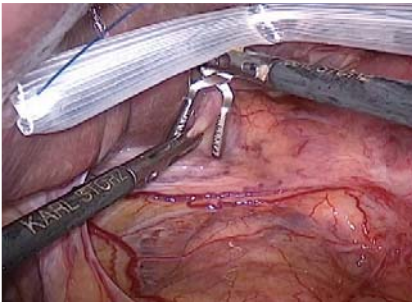


● 胃粘膜下腫瘍に対する  
胃局所切除術(12mm)

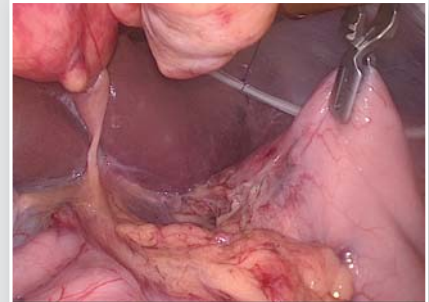

● 胆嚢摘出術(5mm)

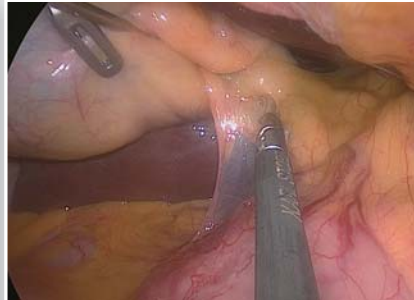

● 右半結腸切除術(12mm)

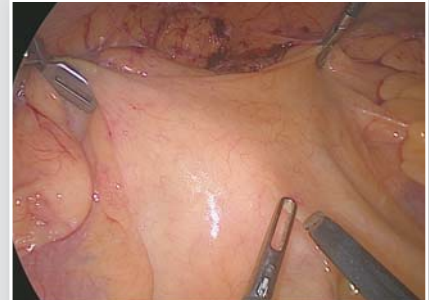

## CHARMANT

株式会社シャルマン メディカル事業部

〒916-8555 福井県鯖江市川去町6-1

TEL.0120-180807 FAX.0120-030887 www.charmant-medical.com